


Schröpfmatten zur Schröpftherapie mit HeVaTech PRV 02 Vakuumpumpe oder mit herkömmlichen elektrischen Vakuumpumpen.

In Kombination mit einer HeVaTech PRV 02 Vakuumpumpe oder Vakuumpumpen ohne Pulsation stellen diese Matten eine wesentliche Arbeitserleichterung, Zeitersparnis und Steigerung der Effektivität bei der Lymphdrainage bzw. des Schröpfens dar.

Nackenmatte

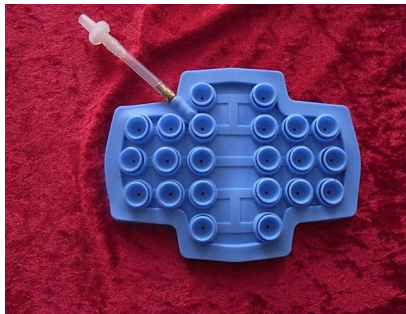


Diese Matte eignet sich in Verbindung mit einem pulsierenden Vakuumgerät besonders gut zur sanften Nackenmassage und wird als sehr angenehm und wohltuend bei Migräne und Spannungskopfschmerzen empfunden.

Wir empfehlen für HeVaTech Geräte einen Unterdruck von 150-300 mbar, Intervall 2s. Puls/Pause 25-50% Lymphmassage-Matten

Für das Schröpfen mit Vakuumpumpen ohne Pulsation regeln Sie das Vakuum am Druckregler und nach Bedarf.

Lymphmatte

Diese Matte ist für die Lymphaktivierung an Unterarmen, Waden, schlanken Innenschenkeln sowie

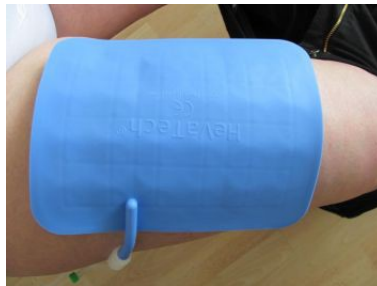

Rücken und Bauch bei Kindern gedacht.

Wir empfehlen für HeVaTech Geräte einen Unterdruck von 100-200 mbar, Intervall 0,2 oder 2s. Puls/Pause 25-50%

Für das Schröpfen mit Vakuumpumpen ohne Pulsation regeln Sie das Vakuum am Druckregler und nach Bedarf.

Bauch-Beine-Po Cellulite Matte



Diese Matte eignet sich zur Lymphaktivierung im Bauch- Beine- Po Bereich. Sie kann auch großflächig am Rücken eingesetzt werden.

Wir empfehlen für HeVaTech Geräte einen Unterdruck von 100-200, am Rücken bis zu 300mbar, Intervall 0,2 oder 2s. Puls/Pause 25-50%
Für das Schröpfen mit Vakuumpumpen ohne Pulsation regeln Sie das Vakuum am Druckregler und nach Bedarf.

Bei der Anwendung der Matten sollte die Haut vorher mit einem Hautöl eingeeilt werden.

Anwendung: Entsprechend den EU Richtlinien **zur nicht invasiven Anwendung** auf der Haut.

Die Schröpfabbildungen zeigen das behandelte Areal nach einer Therapie mit einer herkömmlichen elektrischen Vakuumpumpe.

Wirkung beim HeVaTech Gerät

Durch die sanften Intervalle der PRV02 wirken die kleinen Saugschalen der Matten wie Pumpen auf die Lymphgefäße, dadurch wird der Lymphfluss angeregt, wurden vorher die Hauptlymphgefäße geöffnet tritt eine sehr schnelle und effektive Entstauung ein. Schon nach wenigen Minuten ist eine deutliche Belebung der Haut sichtbar.

Die Matten eignen sich auch besonders gut an sehr empfindlichen Stellen, so können diese, in Kombination mit der PRV02, sehr sanft am Innenschenkel aufgesetzt werden.

Für normale Vakuumpumpen verwenden Sie die Matten wie Schröpfköpfe

Reinigung: Nach jeder Anwendung von Öl Rückständen reinigen.

Desinfektion: Nach jeder Anwendung mit handelsüblicher Desinfektionslösung desinfizieren.

Sie finden die Matten in unserem Shop in der Warengruppe Schröpfen unter <http://www.stockburgershop.de/shop2/de/schroepfen/hevatech/zubehoer-hevatech>

Shop für Medizin, Naturheilkunde, Akupunktur, Gesundheit, Wellness, medizinische Bücher, alles für die Frau, erektile Dysfunktion

Susanne Engesser Alte Wolterdinger Str. 55 78166 Donaueschingen
Telefon: +49 0771/5869 Telefax: Fax.+49 321 212 32699
<http://www.stockburgershop.de>